

JOBST®



JOBST® FarrowWrap®

Korte rek klittenbandsysteem voor compressiebehandeling



Hoe bereikt uw patiënt **evenwicht** tussen gezondheid en **levenskwaliteit**?

Omgaan met een chronische ziekte als lymfoedeem en andere types van oedeem vereist op de langere termijn een dynamische benadering en actieve betrokkenheid van de patiënt. Bij JOBST kennen we het uiteindelijke doel: de patiënt mogelijkheden bieden om zelfstandig met hun aandoening en de gerelateerde verzorging om te gaan. We bieden daarom bijzonder flexibele behandelopties om tegemoet te komen aan

de uiteenlopende voorkeuren en behoeften van de patiënt. JOBST FarrowWrap is een gepatenteerd en uniek compressiesysteem dat het voor de patiënt eenvoudiger maakt de compressietherapie dagelijks toe te passen. De patiënt is niet alleen op zoek naar de beste behandeling, maar naar de beste individueel afgestemde behandeling.

Zelfmanagement voor uw patiënten

Bij JOBST helpen we zorgverleners graag bij het vinden van de meest geschikte behandeling. Het uitgangspunt is de behoefte van de patiënt, zodat patiënten zelfredzaam, onafhankelijk en actief kunnen blijven.

We richten ons ook op het motiveren van de patiënt om, met het oog op optimale resultaten, de therapie vol te blijven houden.

Aangepast

aan de therapie
aan de levensstijl

aan het dagelijks leven van uw patiënt



Op YouTube vindt u
JOBST FarrowWrap
aantrekinstructies
voor uw patiënt

De behandeling van **lymfoedeem** kan een **complex** proces zijn

Omdat alle patiënten anders zijn en verschillende behoeften hebben, kunt u verschillende opties overwegen.



Compressietherapie met bandages

Bij deze vorm van compressietherapie wordt compressie gegeven met Comprilan korte rek zwachtels in combinatie met Soffban polstermaterialen die door een deskundige zorgprofessional worden aangelegd. Tijdens de decongestieve fase kan ook gebruik worden gemaakt van Compri2 meerlaagse verbanden.

Afweging

De **JOBST FarrowWrap** biedt patiënten zelfstandigheid, omdat het product door de patiënt **zelf** verwijderd en opnieuw aangebracht kan worden.

Vlakbreikousen

Esthetisch het meest aantrekkelijk en passend bij kleding, met minder lagen dan verbanden of zwachtels. JOBST Elvarex garandeert een uitstekende individuele pasvorm voor de onderste en bovenste ledematen.

Afweging

Is het oedeem **gestabiliseerd** en is het mogelijk om een vlakbreikous aan te meten? Dan kan **JOBST Elvarex** de ideale oplossing zijn.



U zoekt de **beste** oplossing voor **uw patiënt**

Er zijn diverse compressie-oplossingen om oedeem in ledematen onder controle te krijgen. Compressieverbanden en -kousen worden vaak als eerste keuze gezien, klittenbandsystemen kunnen echter een beter alternatief zijn voor sommige patiënten.



JOBST® FarrowWrap®

JOBST FarrowWrap kan een alternatief bieden voor patiënten met fluctuerend oedeem en/of terugkerend oedeem. Daarnaast zijn er heel wat patiënten die moeite hebben met aanleggen en verwijderen van zwachtels. Ook bij patiënten die aangewezen zijn op zelfredzaamheid kan FarrowWrap een oplossing bieden.

De overlappende banden bieden ondersteuning en stevigheid bij het behandelen van oedeem. JOBST FarrowWrap biedt patiënten zelfstandigheid, omdat het product door de patiënt zelf verwijderd en opnieuw aangebracht kan worden.

Afweging


Heeft uw patiënt fluctuerend oedeem? Is **compressietherapie** met bandages of compressiekousen niet mogelijk of moeilijk? In deze gevallen kan **JOBST FarrowWrap** de ideale oplossing zijn.

JOBST® FarrowWrap®

JOBST FarrowWrap is een uniek en gepatenteerd compressiehulpmiddel dat op een effectieve manier helpt om het oedeem in armen, handen, benen en voeten terug te dringen. Het ondersteunt de behandeling van aandoeningen die oedeem veroorzaken, zoals chronische veneuze insufficiëntie, lymfoedeem, postoperatieve complicaties of posttraumatische oedemen. JOBST FarrowWrap producten kunnen ook als toevoeging over een compressiekous aangebracht worden, indien een kous alleen niet volstaat om het oedeem te stabiliseren. JOBST FarrowWrap is eenvoudig te verwijderen en opnieuw aan te brengen wat de zelfredzaamheid van de patiënt stimuleert.

Pluspunten


- Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen
- Slimmere compressietechnologie
- Aanpasbaar aan de mate van het oedeem
- Duurzaam en comfortabel
- Geschikt voor de wasmachine

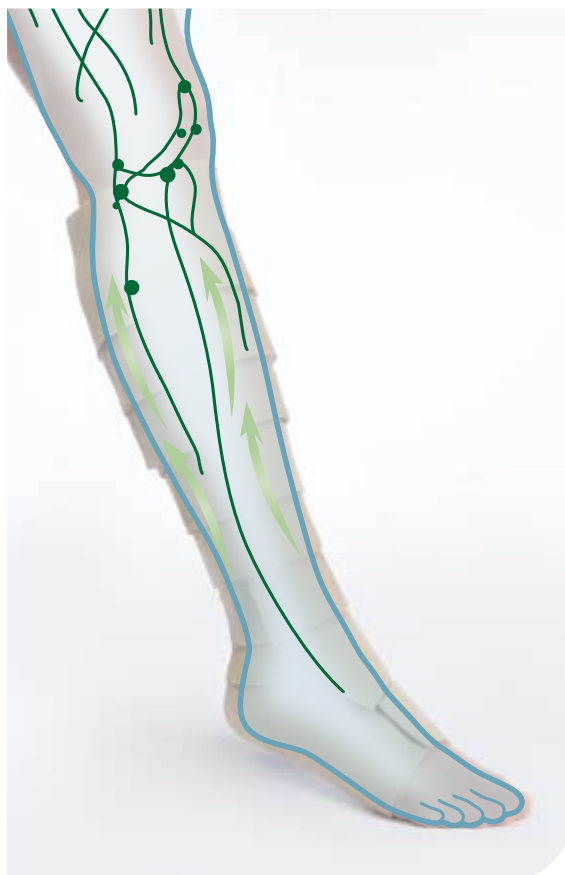

JOBST® FarrowWrap®, de gepatenteerde technologie met korte rek

Diverse korte rek banden zijn bevestigd aan een stevige kern die de basis vormt van JOBST FarrowWrap.

Iedere band is voorzien van een stevige en duurzame klittenbandsluiting. De banden dienen rondom het te behandelen lichaamsdeel aangebracht te worden, waarbij deze elkaar steeds 50% overlappen.

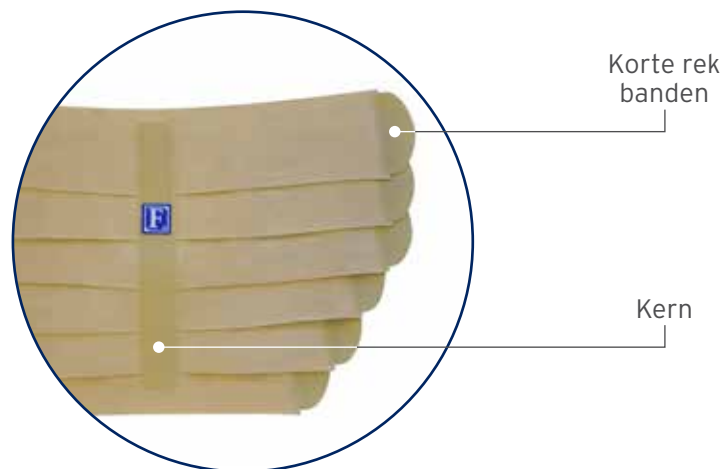


Gegarandeerde graduele compressie

Het is belangrijk dat iedere band van een JOBST FarrowWrap verband op gelijkmatige gemiddelde rek wordt aangelegd. Door een gelijkmatige spanning over de gehele lengte van het product ontstaat er

aflopende compressie. Indien in de loop van de dag het JOBST FarrowWrap verband losser gaat zitten, kunnen de banden meteen worden aangepast om blijvend een optimale compressie te geven.

Rustdruk en werkdruk

De rustdruk is de druk die FarrowWrap uitoefent op een liggend, rustend lichaamsdeel, in het bijzonder de venen en lymfevaten bij een patiënt in rust. De werkdruk echter geeft de druk weer die FarrowWrap uitoefent tijdens beweging. Die druk is afhankelijk van de contractie van de kuitspier en het materiaal van de FarrowWrap. De rustdruk van FarrowWrap LITE is 20-30 mmHg en deze van FarrowWrap STRONG is 30-40 mmHg.

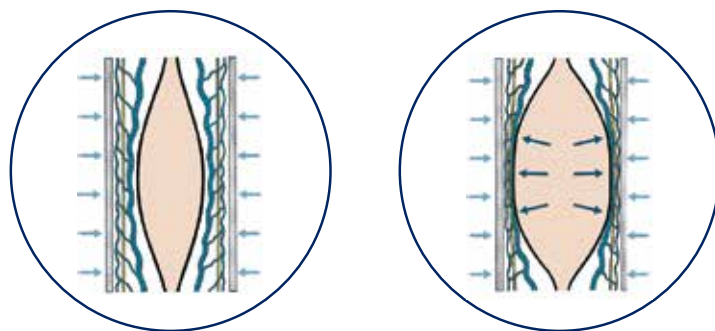

JOBST FarrowWrap verhoogt de mobiliteit en zorgt ervoor dat de patiënt zelfstandig de compressiebehandeling kan optimaliseren. JOBST FarrowWrap geeft de druk die aansluit bij de dagelijkse bezigheden van de patiënt: meer druk tijdens actieve momenten en minder druk tijdens rust.

Zodra het behandelde lichaamsdeel oedeemvrij is, kan een compressiekous worden aangemeten om het behaalde resultaat te behouden. Voor sommige patiënten is de JOBST FarrowWrap een blijvende oplossing.

JOBST® FarrowWrap® assortiment

JOBST® FarrowWrap® LITE

- JOBST FarrowWrap LITE verbanden zijn compressiehulpmiddelen met korte rek voor het reduceren van milde tot gemiddelde oedeem. JOBST FarrowWrap LITE kan gecombineerd worden met alle overige producten uit het JOBST FarrowWrap assortiment.
- Compressie in rust 20-30 mmHg.

Voordelen

- Eenvoudig aanbrengen stimuleert zelfredzaamheid
- Aanpasbaar aan de mate van het oedeem
- Duurzaam en comfortabel
- In een schoen te dragen
- Overdag en 's nachts te dragen
- Goed wasbaar/onderhoudsvriendelijk
- Over een compressiekous te dragen

Voorzorgsmaatregelen

Raadpleeg de behandelende arts als de patiënt het volgende heeft ervaren of als zich het volgende ontwikkelt:

- Huidinfectie of vochtafscheiding
- Lichte slagaderaandoening
- Allergische of allergie-achtige reacties op materialen
- Verlies van gevoel in de ledematen (perifere neuropathie)
- Gecontroleerde decompensatio cordis (CHF)
- Carpaal tunnel syndroom
- Voorgeschiedenis van bloedstolsels in de benen

Indicaties

Voor de behandeling van licht tot matig lymfoedeem of andere oedemen.

Contra-indicaties

JOBST FarrowWrap LITE mag niet worden gedragen als de patiënt de volgende medische aandoeningen heeft:

- Ernstige slagaderaandoening
- Onbehandelde aderinfectie (septische flebitis)
- Ongecontroleerd hartfalen (compensatio cordis)
- Onbehandelde en/of voortschrijdende huidinfectie van de ledematen
- Groot bloedstolsel in de ader (Flegmasia cerulea dolens)

JOBST FarrowWrap producten zijn ontworpen om met elkaar te worden gecombineerd en dienen niet te worden gebruikt samen met niet-JOBST FarrowWrap producten.



JOBST® FarrowWrap® STRONG

- JOBST FarrowWrap STRONG verbanden zijn compressiehulpmiddelen met korte rek voor het reduceren van matige tot ernstige oedemen. JOBST FarrowWrap STRONG kan gecombineerd worden met alle overige producten uit het JOBST FarrowWrap assortiment
- Compressie in rust 30-40 mmHg.

Voordelen

- Stevig en robuust verband
- Doordat de patiënt het product zelf kan hanteren, wordt de zelfredzaamheid bevorderd
- Aanpasbaar aan de mate van het oedeem
- Duurzaam en comfortabel
- In een schoen te dragen
- Overdag en 's nachts te dragen
- Goed wasbaar/onderhoudsvriendelijk
- Over een compressiekous te dragen

Voorzorgsmaatregelen

Raadpleeg de behandelende arts als de patiënt het volgende heeft ervaren of als zich het volgende ontwikkelt:

- Huidinfectie of vochtafscheiding
- Lichte tot matige slagaderaandoening
- Allergische of allergie-achtige reacties op materialen
- Verlies van gevoel in de ledematen (perifere neuropathie)
- Voorgeschiedenis van bloedstolsels in de benen
- Gecontroleerde decompensatio cordis (CHF)

Indicaties

Voor de behandeling van matig tot ernstig lymfoedeem of andere oedemen.










Contra-indicaties


JOBST FarrowWrap STRONG mag niet worden gedragen als de patiënt de volgende medische aandoeningen heeft:

- Matige tot ernstige slagaderaandoening
- Lichte slagaderaandoening gecombineerd met perifere neuropathie
- Onbehandelde aderinfectie (septische flebitis)
- Ongecontroleerd hartfalen (compensatio cordis)
- Onbehandelde en/of voortschrijdende huidinfectie van de ledematen
- Groot bloedstolsel in de ader (Flegmasia cerulea dolens)

JOBST FarrowWrap producten zijn ontworpen om met elkaar te worden gecombineerd en dienen niet te worden gebruikt samen met niet-JOBST FarrowWrap producten.

Confectie productassortiment

	Tweezijdig teenverband	Voetverband	Onderbeenverband	Knieverband	Bovenbeenverband	Armverband	Tweezijdig handverband	Tweezijdig vingerverband
JOBST FarrowWrap LITE Lichte tot matige compressie, 20-30 mmHg								
JOBST® FarrowWrap STRONG Matige tot zware compressie, 30-40 mmHg								

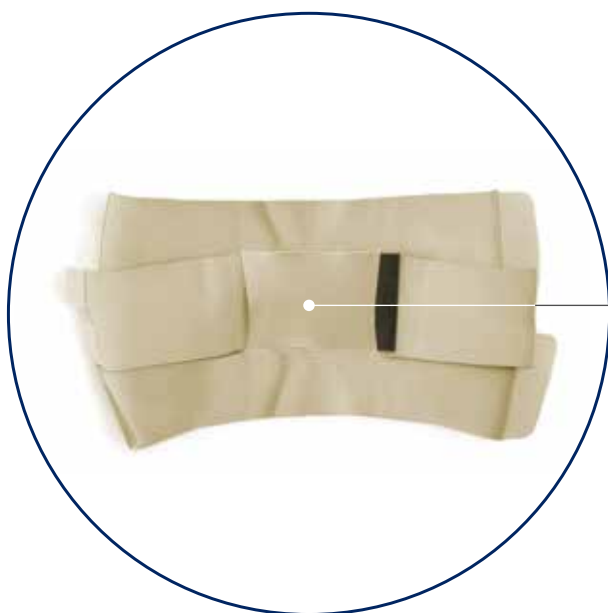

Een opgevouwen **JOBST FarrowWrap** knieverband

Onderste ledematen



JOBST® FarrowWrap® LITE teenverband

Meetpunt		XS	S	M	L
Ⓐ	Omvang voorvoet	20-22 cm	22-24 cm	24-26 cm	26-28 cm



JOBST® FarrowWrap® STRONG voetverband

Meetpunt		XS	S	M	L	XL
Ⓐ	Omvang voorvoet	22-24 cm	25-27 cm	28-30 cm	31-34 cm	35-40 cm
IⒶ	Voetlengte normaal (-2 cm / +2 cm*)	16,5 cm	18 cm	19,5 cm	21 cm	23 cm
IⒶ	Voetlengte lang (-2 cm / +2 cm*)	18,5 cm	20 cm	21,5 cm	23 cm	25 cm

* De lengtematen hebben een marge van 2 cm naar boven en naar beneden



JOBST® FarrowWrap® STRONG onderbeenverband

Meetpunt		XS	S	M	L	XL
Ⓑ	Enkelomvang	20-27 cm	25-32 cm	30-38 cm	37-44 cm	45-52 cm
Ⓒ	Kuitomvang	35-45 cm	40-52 cm	48-60 cm	55-65 cm	60-70 cm
IⒹ	Normale lengte (-2 cm / +2 cm*)	37 cm	39 cm	41 cm	43 cm	44 cm
IⒹ	Lange lengte (-2 cm / +2 cm*)	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	49 cm



JOBST® FarrowWrap® STRONG knieverband

Meetpunt		XS	S	M	L	XL
Ⓒ	Kuitomvang	36-43 cm	42-50 cm	48-58 cm	53-63 cm	58-68 cm
Ⓕ	Omtrek 10 cm boven knie	47-52 cm	53-59 cm	60-66 cm	67-73 cm	74-80 cm



JOBST® FarrowWrap® STRONG bovenbeenverband incl. knieverband

Meetpunt		XS	S	M	L	XL
Ⓕ	Omtrek 10 cm boven knie	45-52 cm	50-59 cm	60-66 cm	67-73 cm	74-80 cm
Ⓖ	Omtrek bovenbeen	50-70 cm	60-75 cm	70-80 cm	75-90 cm	85-100 cm
IⒺ-Ⓖ	Korte lengte	18 cm	18 cm	18 cm	18 cm	18 cm
IⒺ-Ⓖ	Normale lengte	23 cm	23 cm	23 cm	23 cm	23 cm
IⒺ-Ⓖ	Lange lengte	29 cm	29 cm	29 cm	29 cm	29 cm

Bovenste ledematen



JOBST® FarrowWrap® LITE OTS armverband

Dit is een effectieve, anatomisch gevormde oplossing voor oedeem in de arm. De ingenaaide liner maakt het eenvoudig om het product aan te leggen en te verwijderen. Licht en comfortabel, maar met een stevige korte rek.

Het FarrowWrap armverband is leverbaar in zwart en huidskleur.

JOBST® FarrowWrap® LITE armverband

Meetpunt		M	L	XL
Ⓒ	Oksel	22-29 cm	29-37 cm	32-44 cm
Ⓔ	Elleboog	22-26 cm	26-32 cm	30-39 cm
Ⓒ	Pols	14-17 cm	16-19 cm	19-22 cm
Lengte		Kort	Normaal	Lang
I Ⓒ-Ⓔ		38-42 cm	42-46 cm	46-50 cm



JOBST® FarrowWrap® LITE handverband

Het JOBST FarrowWrap LITE handverband is geschikt voor beide handen en wordt geleverd met 4 mm en 8 mm dikke schuimelementen met klittenband. Geschikt voor licht tot ernstig oedeem.

Voordelen:

Schuimelementen helpen oedeem, dat zich vaak concentreert op de handrug, te verminderen. Geschikt voor beide handen.

JOBST® FarrowWrap® LITE handverband

Meetpunt		XS	S	M	L
Ⓐ	Omtrek aanzet vingers	< 18 cm	18-20 cm	20-22 cm	> 22 cm
Ⓑ	Omtrek handpalm	< 19 cm	19-21 cm	21-23 cm	> 24 cm



JOBST® FarrowWrap® LITE vingerverband

De confectie en latexvrije JOBST FarrowWrap LITE vingerverbanden bieden 20-30 mmHg compressie voor patiënten met licht tot matig oedeem. De ultradunne stof en fijne naden zorgen voor hoog draagcomfort.


Het vingerverband is leverbaar in acht maten en leent zich daarmee voor uiteenlopende patiëntbehoeften. Na een eerste maal wassen zijn de vingers eenvoudig met een schaar in te korten tot de gewenste lengte.

JOBST® FarrowWrap® LITE vingerverband



Meetpunt		1	2	3	4	5	6	7	8
Ⓐ	Omtrek aanzet vingers	16,6-18,0 cm	16,6-18,0 cm	18,0-19,5 cm	18,0-19,5 cm	18,0-19,5 cm	19,5-21,5 cm	19,5-21,5 cm	21,5-23,1 cm
Ⓒ	Pols	15,6-16,7 cm	16,7-18,1 cm	15,9-17,0 cm	17,0-18,5 cm	18,5-20,4 cm	17,2-18,7 cm	18,7-20,6 cm	18,3-20,1 cm

Meetpunten

Onderste ledematen

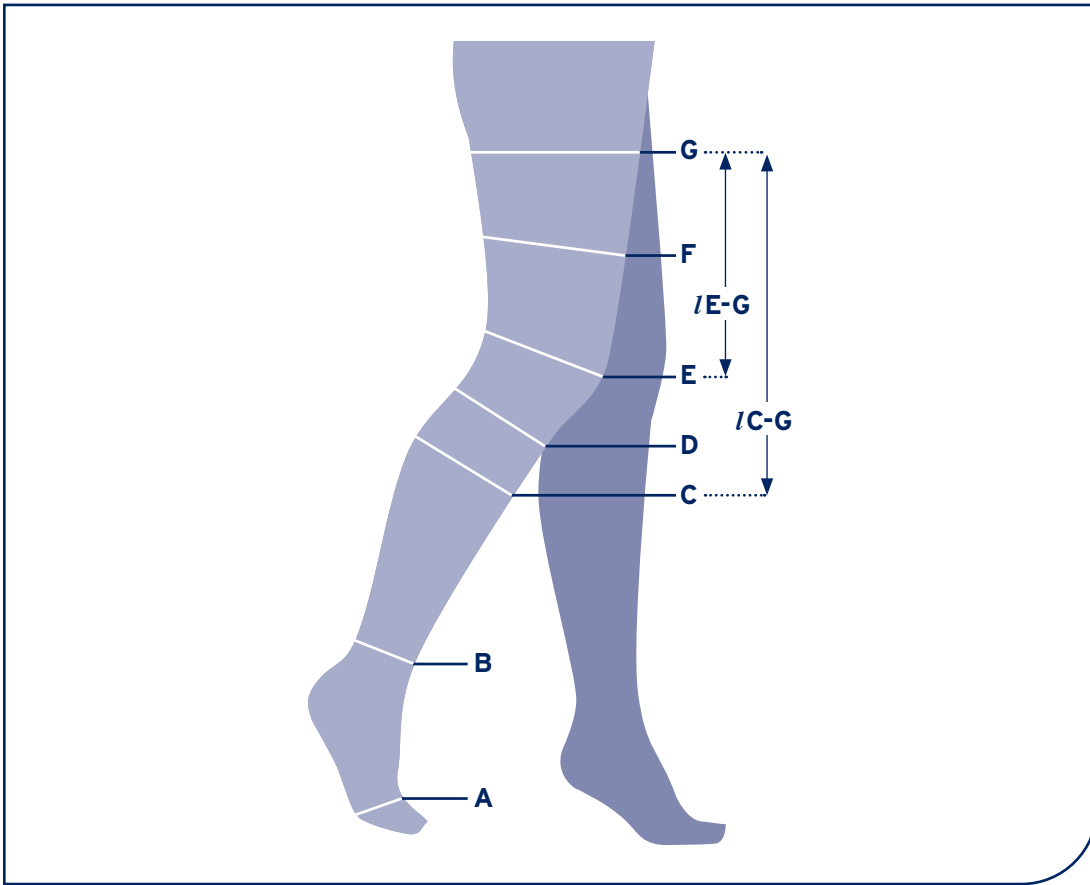

Bovenste ledematen

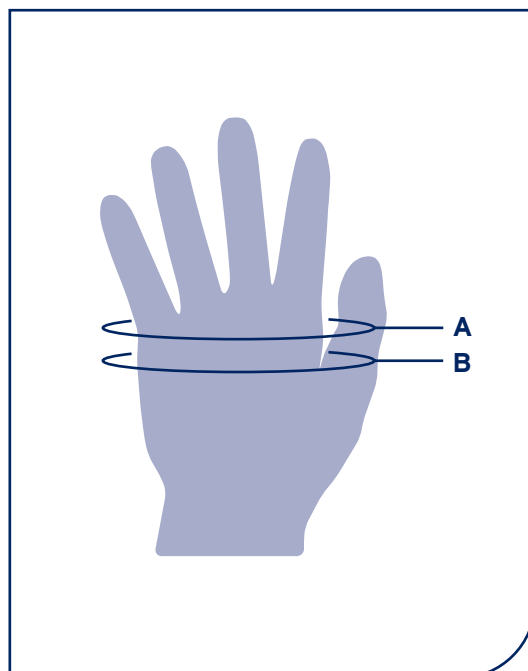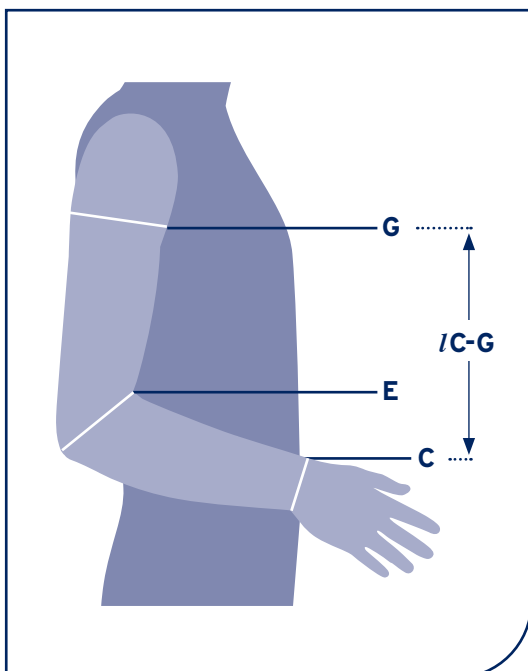

Overige producten

JOBST® FarrowHybrid® ADI Voetcompressie

JOBST FarrowHybrid ADI Voetcompressie is geschikt voor mild tot matig oedeem. Het biedt een compressie van 20-30 mmHg aan de voet en enkel, terwijl het boven de enkel functioneert als een liner ter bescherming van de huid onder het FarrowWrap onderbeenverband.

Producteigenschappen

- Aanvulling op de FarrowWrap beenverbanden
- Voetcompressie die in schoenen kan worden gedragen
- Makkelijk aan te doen
- Beschikbaar in een brede maatvoering



JOBST® FarrowHybrid® ADI voetcompressie

	S	M	L
Schoenmaat	34-39	39,5-42	42,5-46

JOBST® FarrowWrap® Liners

Toepassing

Deze Liners zijn speciaal ontwikkeld als beschermlaag, onder JOBST FarrowWrap voet- en beenverband. Hier overheen wordt JOBST FarrowWrap aangebracht. Het materiaal waarvan de Liners zijn gemaakt is zacht en verdeelt de druk uitstekend.

Bij JOBST FarrowWrap boven- of onderbeenverband worden standaard twee Liners geleverd. Het JOBST FarrowWrap armverband heeft reeds een ingenaaide liner.

Kenmerken

- Hygiënisch. Doordat de Liners onder een JOBST FarrowWrap product gedragen worden, blijft de JOBST FarrowWrap schoon. Wij adviseren om de Liners dagelijks te wassen
- Beschermde de huid
- Drukloos en zonder irriterende naden
- Antibacteriële en antimycotische werking (zilver)
- Zowel links als rechts te dragen
- Bij onderbeenverbanden maat XS en S worden maat S Liners geleverd.
Bij onderbeenverbanden maat M, L en XL worden maat L Liners geleverd.



JOBST FarrowWrap been Liner

JOBST® FarrowWrap® antislipverband

Toepassing

JOBST FarrowWrap antislipverbanden zijn korte rek verbanden die ingezet kunnen worden om JOBST FarrowWrap verbanden te fixeren, zoals bijvoorbeeld bij een JOBST FarrowWrap bovenbeen- en/of onderbeenverband of een armverband. Een antislipverband kan ook gebruikt worden in combinatie met elastische kousen die dreigen af te zakken. Het product wordt vervaardigd met nylon en lycra; dit product is dus latexvrij. Aan de binnenzijde is een speciale antislip laag aangebracht, die voor extra grip zorgt onder het JOBST FarrowWrap beenverband.

Kenmerken

- Voorzien van een losse sluitstrip van duurzaam klittenband
- Flexibel inzetbaar om plaatselijk meer druk te geven, bijvoorbeeld torso of midline gebied

JOBST® FarrowWrap® antislipverband	Maat
JOBST FarrowWrap been antislipverband	14 x 120 cm
JOBST FarrowWrap arm antislipverband	10 x 60 cm
JOBST FarrowWrap torso antislipverband	14 x 550 cm
JOBST FarrowWrap midline antislipverband	20 x 120 cm





JOBST®,
an Essity brand

04/2020

Essity Belgium SA-NV
Health and Medical Solutions
Berkenlaan 8b bus 3
1831 Diegem

Tel +32(0)2 766 05 05
Fax +32(0)800 15 934
orders.be@essity.com
info.be@essity.com